



Tabla del Tiempo del uso del Oxigeno Liquido: Duracion

Modelo	Off	0.031	0.05	0.063	0.10	0.12	0.125	0.20	0.25	0.30	0.375	0.40	0.50	0.625	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	15.00	
Portables																														
HELIOS Plus	21.9	-	-	-		21.9	-	-	17.8	-	-	-	12.0	-	7.6	18.4	-	12.2	9.2	7.3	6.1	5.2	4.6	-	-	-	-	-	-	-
HELIOS Marathon	48.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	29.3	6.1 22.0	17.6	4.0 14.6	-	3.0 11.0	2.4	2.0	-	-	-	-	
Spirit 300	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	10.7	2.4 8.0	-	5.4	-	4.0	3.2	-	-	-	-	-	
Spirit 600	31.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.3	-	21.4	4.8 16.1	-	10.7	-	8.0	6.4	-	-	-	-		
Spirit 1200	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.4	-	40.5	9.2 30.4	-	20.3	-	15.2	12.2	-	-	-	-		
Sprint	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	-	27.7	27.7	27.7	27.7	22.9	21.4	17.2	13.7	11.4	8.6	6.8	5.5	4.3	3.6	3.1	-	2.4	2.0	1.7	-	-	-	-	
Stroller	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	-	55.4	55.4	55.4	55.4	45.8	42.9	34.3	27.4	22.8	17.1	13.7	11.4	8.5	6.8	5.7	-	4.4	3.6	3.0	-	-	-	-	
Hi Flow Stroller	55.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.3	-	-	17.1		11.4	8.5	6.8	5.7	-	4.4	-	3.0	2.3	1.9	1.6	1.4	
Companion 1000	55.4	-	-	-	-	55.4	-	-	55.4	-	-	-	21.5	-	22.8	17.1		11.4	8.5	6.8	5.7	4.9	4.1	3.3	2.8	-	-	-	-	
Companion 1000T	55.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.5	-	-	17.1		11.4	8.5	-	5.7	-	4.1	3.3	2.8	2.1	1.7	-	1.2	
Embalses																														
Liberator 20	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	-	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	30.1	24.1	19.3	16.1	12.0	9.6	8.0	6.0	4.8	4.0	-	3.0	2.4	2.0	1.5	1.2	1.0	0.8	
Liberator 30	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	-	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	44.4	35.5	28.4	23.7	17.76	14,2	11.8	8.9	7.1	5.9	-	4.4	3.6	3.0	2.2	1.8	1.5	1.2	
Liberator 37	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	-	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	54.0	43.2	34.6	28.8	21.6	17.3	14.4	10.8	8.6	7.2	-	5.4	4.3	3.6	2.7	2.2	1.8	1.4	
Liberator 45	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	-	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	65.5	52.4	41.9	34.9	26.2	21.0	17.5	13.1	10.5	8.7	-	6.5	5.2	4.4	3.3	2.6	2.2	1.7	
Liberator 60	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	-	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	84.5	69.0	55.2	46.0	34.5	27.6	23.0	17.2	13.8	11.5	-	8.6	6.9	5.7	4.3	3.4	2.9	2.3	
Companion 21	26.5	-	-	-	-	26.5	-	-	26.5	-	-	-	22.6	-	17.6	12.9	-	8.8	6.5	5.1	4.3	3.6	3.2	2.5	2.1	-	-	-	-	
Companion 31	39.2	-	-	-	-	39.2	-	-	39.2	-	-	-	33.4	-	26.1	19.1	-	12.9	9.6	7.6	6.3	5.4	4.7	3.7	3.1	-	-	-	-	
Companion 41	51.8	-	-	-	-	51.8	-	-	51.8	-	-	-	44.2	-	34.5	25.2	-	17.1	12.7	10.0	8.3	7.1	6.2	5.0	4.1	-	-	-	-	
HELIOS 36	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.8	-	29.2	21.7	-	14.5	10.9	-	7.2	-	5.4	4.3	3.6	2.7	2.2	-	-	
HELIOS 46	92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.3	-	37.3	27.8	-	18.5	13.9	-	9.3	-	6.9	5.6	4.6	3.5	2.8	-	-	
Universal 36	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.8	-	29.2	21.7	-	14.5	10.9	-	7.2	-	5.4	4.3	3.6	2.7	2.2	-	-	
Universal 46	92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.3	-	37.3	27.8	-	18.5	13.9	-	9.3	-	6.9	5.6	4.6	3.5	2.8	-	-	

Notas:

- Los equivalentes gaseosos y los tiempos se basan en LOX saturado en la configuración del economizador y en los caudales en sus configuraciones nominales.
- El tiempo de duracion para los Portatiles apacerce en Horas y para los Equipos Estacionarios aparecen en Días.
- EL tiempo de duracion en los modos de demanda esta basado en 20 rpm y aparecen el letra Cursiva.

Tabla del Tiempo del uso del Oxígeno Líquido: Especificaciones

Modelo	Capacidad				Taza de Evaporación Normal		Altura		Peso Vacío		Peso Lleno	
	Litros Líquidos	Libras (LO2)	Kg	Litros Gaseosos	Lbs/Día	Kg/Día	Pulgadas	mm	Libras	Kg	Libras	Kg
Portables												
HELIOS Plus	0.38	0.9	0,41	308	1	0,45	10.5	267	2.7	1,22	3.6	1,63
HELIOS Marathon	0.84	2.0	0,91	685	1.31	0,39	15.0	381	3.6	1,63	5.6	2,54
Spirit 300	0.30	0.8	0,36	275	1.30	0,57	8.8	223	3.5	1,60	4.3	1,95
Spirit 600	0.60	1.5	0,68	516	1.30	0,57	11.5	292	4.1	1,86	5.6	2,54
Spirit 1200	1.30	3.0	1,36	1,026	1.30	0,57	14.0	355	5.0	2,27	8	3,63
Sprint	0.63	1.5	0,68	513	1.30	0,57	11.75	298	4.5	2,04	6	2,72
Stroller	1.25	3.0	1,36	1,026	1.30	0,57	13.5	343	5.0	2,27	8	3,63
Hi-Flow Stroller	1.20	3.0	1,36	1,025	1.30	0,57	13.5	343	5.5	2,49	8.5	3,86
Companion 1000	1.23	3.1	1,41	1,058	1.30	0,60	13.8	351	5.0	2,27	8.1	3,67
Companion 1000T	1.23	3.1	1,41	1,058	1.30	0,60	14.5	368	5.6	2,54	8.7	3,95
Embalses												
Liberator 20	21.0	50.7	23,0	17,337	1.60	0,73	24.5	622	39	17,96	90	40,69
Liberator 30	31.0	74.8	33,9	25,580	1.60	0,73	29.5	750	48.6	22,04	122.3	55,94
Liberator 37	37.3	91.0	41,3	31,121	1.60	0,73	32.75	832	50	22,68	140	64,40
Liberator 45	45.7	110.3	50,04	37,724	1.60	0,73	37.0	940	55	24,95	167	75,70
Liberator 60	60.2	145.3	65,9	49,679	1.65	0,75	39.0	990	75.4	34,19	220.7	100,09
Companion 21	21	49	22,23	16,750	1.90	0,86	27.5	698	45	20,41	94	42,64
Companion 31	31	73	33,11	24,950	1.90	0,86	33.0	838	51	23,13	124	56,25
Companion 41	41	98	44,45	33,500	1.90	0,86	38.5	978	60	27,21	158	71,67
HELIOS 36	36	85	38,60	29,069	1.20	0,54	33.5	851	53	24,00	138	62,60
HELIOS 46	46	110	49,90	37,619	1.20	0,54	37.5	952	60	27,20	170	77,10
Universal 36	36	85	38,56	29,069	1.20	0,54	33.5	851	53	24,04	138	62,60
Universal 46	46	110	49,90	37,619	1.20	0,54	37.5	952	60	27,21	170	77,11