

# Spirit™ 300, 600 & 1200

Tragbare Flüssigsauerstoffsysteme

## Komfort und Anwenderfreundlichkeit

Die tragbaren CAIRE Spirit Flüssigsauerstoffgeräte sollen den Patientenkomfort, die Anwenderfreundlichkeit und die Mobilität verbessern. Die Spirit-Modelle werden in einem attraktiven Ledergehäuse geliefert und bieten Durchschnittspatienten, die auf Sauerstoffversorgung angewiesen sind, eine mobile Therapie über eine lange Laufzeit. Mit ihrem leichten und komfortablen Design in attraktiver Optik bieten die Spirit-Modelle eine neue Dimension der Patientenfreiheit.

Alle Spirit-Modelle verfügen über ein eingebautes elektronisches digitales Sauerstoff-Rationalisierungssystem (kurz DOCD), das bei jedem Atemzug die eingestellte Menge Sauerstoff verabreicht. Das DOCD erweitert die Sauerstoffdauer entsprechend der jeweiligen Einstellung und ermöglicht zugleich die geringe Größe und das leichte Gewicht des Geräts. Das Sauerstoff-Rationalisierungssystem wird durch langlebige und leicht auszuwechselnde Dual-C Batterien mit Strom versorgt. Der einzige, einfach zu bedienende Einstellregler ist für den Patienten benutzerfreundlich, während die weiche Schutzhülle dem Patienten Komfort und Anwenderfreundlichkeit bietet.

Die Spirit-Modelle sind mit Anschlüssen für die Seiten- und Obenbefüllung erhältlich und leicht zu befüllen. Das geräuschlose Füllverfahren, das aus einem einzigen Schritt besteht, ist in weniger als einer Minute abgeschlossen, es ist keine Stromversorgung erforderlich.



### PRODUKTMERKMALE

- Klein und handlich, wodurch ein aktiver Lebenswandel unterstützt wird
- Leichte Tragbarkeit
- Wählen Sie zwischen Durchflussraten von 1 - 5 l/min und einer kontinuierlichen Zufuhr
- Liefert bei 2 l/min eine Nutzungsdauer von 7 - 28 Stunden
- Erhältlich mit Anschlüssen für Seiten- oder Obenbefüllung
- Bequeme Tragetasche

The CAIRE logo consists of the word "CAIRE" in a bold, blue, sans-serif font. Above the letter "A" are three wavy lines representing a stylized flame or oxygen flow.

CAIRE verfügt über das breiteste Angebot an Sauerstoffprodukten mit Optionen, die den Verordnungen und Mobilitätsbedürfnissen jedes Patienten gerecht werden. Besuchen Sie [www.caireinc.com](http://www.caireinc.com), um sich über tragbare Flüssigsauerstoff(LOX)-Einheiten für den On-Demand- und High-Flow-Betrieb und unsere tragbaren, transportablen und stationären Sauerstoffkonzentratoren zu informieren.

# Spirit™ 300, 600 & 1200

Tragbare Flüssigsauerstoffsysteme

## Produktdaten

	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200
LOX-Kapazität	0,36 kg	0,68 kg	1,36 kg
Gasförmiges Füllvermögen	275 L	516 L	1026 L
Leergewicht	1,6 kg	1,86 kg	2,27 kg
Gewicht in gefülltem Zustand	1,95 kg	2,54 kg	3,63 kg
Höhe	223 mm	292 mm	335 mm
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min	8 Stunden	16.1 Stunden	30.4 Stunden
Betriebsdruck	137 kPa	137 kPa	137 kPa
Normale Verdampfungsrate	0,54 kg/Tag	0,59 kg/Tag	0,59 kg/Tag
Standard-Messbereich für den Durchfluss	Bedarf: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*	Bedarf: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*	Bedarf: Off 1,1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, FC*

\* Die kontinuierliche Zufuhr (CF) beträgt 2 l/min



## Bestellinformationen\*\*

Beschreibung	Katalognummer
Spirit 300 TF	13104204
Spirit 300 SF	13103130
Spirit 600 TF	13100107
Spirit 600 SF	13104167
Spirit 1200 TF	11940233
Spirit 1200 SF	11940532

## Zubehör

Gürteltasche	11843361
Gürtelverlängerung	11843396
Schulterriemen	13234703
Tasche 17,8 cm x 10,2 cm	11843370
Große Tasche 17,8 cm x 20,3 cm	11843388

\*\* Die Katalognummern beziehen sich auf US-englische Teilenummern. Für Teilenummern Ihrer Sprache, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 CAIRE®

CAIRE Kontaktdaten:  
Kundendienst  
+49 202 258 59132  
[www.caireinc.com](http://www.caireinc.com)

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.

© 2021 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ML-LOX0013-2 D