

SNABBSTARTSGUIDE

VisionAire® 5

DENNA SNABBSTARTSGUIDE ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA DEN DETALJERADE INFORMATION SOM FINNS I DIN BRUKSANVISNING. SE BRUKSANVISNINGEN FÖR VIKTIG INFORMATION OM PRODUKTENS ANVÄNDNING OCH DRIFT.

1 Packa upp din VisionAire® 5



Användarhandbok



2 Lära känna din VisionAire 5

Läs alla varningar, försiktighetsuppmaningar och övrig information om enheten i bruksanvisningen. Bekanta dig med de viktigaste VisionAire 5-funktionerna och användargränssnittet.

FRAMSIDA



BAKSIDA



1 Tim-mätare	Digital visning av koncentratorns förbrukade drifttid. Kan inte återställas.
2 Ström-brytare	AV-/PÅ-strömbrytare för att slå på och stänga av strömförsörjningen till enheten. PÅ-positionen indikeras med symbolen "I" och AV-positionen indikeras med symbolen "O".
3 Uttags-nippel	Syrgas kommer ut här. För att försörja patienten med syrgas ansluts antingen en enkel lumennäskanyl eller standardsyrgasslangar. Den maximala längden hos de konzentoranslutna syrgasslangarna är 15,2 meter (50 fot).
4 Flödes-mätare	Används för att reglera och visa flödes hastigheten hos syrgasen som tillförs. Flödes hastigheter varierar mellan 0,5 och 5 liter per minut (LPM) och kan regleras genom att man vrider på knappen.
5 Filterfack	Tillgängliga filterfack i handtagen möjliggör enkel borttagning och rengöring av tillvalsfilter.
6 Fuktfilter-flaska	Stället är försett med en elastisk rem som ska användas för att hålla fast fuktfilterflaskan. Kontakta din vårdleverantör för att se om befuktning passar dig.
7 Nät-sladd	Sladden ska anslutas till ett uttag för att ge enheten ström.

Summer: Ett larmande ljud som gör dig uppmärksam på eventuella driftsproblem hos enheten, antingen en varning eller ett fel, samt bekräftar korrekta knapptryckningar.

3 Inställning

Vid användning av fuktfilterflaska, fyll först flaskan med destillerat vatten till den nivå som anvisas av tillverkaren. Placera flaskan på det anvisade stödstället och säkra den med den elastiska remmen. Anslut den gängade änden av fuktfilterslangen till flaskan och den andra till uttagsnippeln på VisionAire 5. Anslut syrgasslangar och/eller en näskanyl till uttagsnippeln på fuktfilterflaskan.



Om ingen fuktfilterflaska används ska syrgasslangarna och/eller näskanylen anslutas direkt till uttagsnippeln på VisionAire 5.




4 För in tillvalsfilter i enheten

För in tillvalsluftfilter i handtagen på vardera sidan av VisionAire 5.



5 Sätt på enheten och låt den värmas upp

Koppla in växelströmsladden i ett vägguttag (växelström).

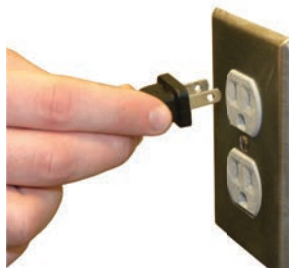

Slå över strömbrytaren till På-positionen.



När VisionAire 5 är påslagen förblir timräknaren aktiverad.

Obs! Låt enheten stå i upp till tio (10) minuter efter att den slagits på för första gången för att den ska nå sina prestandaspecifikationer.

Nätsladden som visas är endast avsedd för illustration. De medföljande kontakterna matchar standarden för ditt land.

6 Justera flödesinställningar till ordinerad nivå

Använd flödesregleringsknappen för att välja det flöde som ordinerats av din läkare.



VARNING: DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT ENBART VÄLJA DEN ORDINERADE NIVÅN AV SYRE. ÄNDRA INTE FLÖDESVÄLET OM DU INTE HAR BLIVIT UPPMANAD ATT GÖRA DET AV EN KVALIFICERAD KLINIKER.

Andas normalt genom näskanylen.

För att reglera flödeshastighet: Vrid motsols för att öka flödet.

Vrid medsols för att minska flödet.

Bollens mitt indikerar flödeshastigheten. Se bilden nedan.