

PIKA-ALOITUSOPAS

VisionAire® 5

TÄMÄN PIKAOPPAAN TARKOITUKSENA EI OLE KORVATA KÄYTTÖOPPAASSA OLEVIA YKSITYISKOHTAISIA TIETOJA. KATSO KÄYTTÖOHJEESTA TÄRKEITÄ KRIITTISIÄ TIETOJA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JA TOIMINNASTA.

1 Pura pakkauksesta VisionAire® 5



Käyttöopas



2 Tutustuminen VisionAire 5 -laitteeseen

Lue kaikki käyttöoppaassasi olevat varoitukset, muistutukset ja laitteen lisätiedot. Tutustu VisionAire 5 -laitteen ja ohjauspaneelin päätoimintoihin.

EDESTÄ



TAKAA



| | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Tunti Metri | Konsentraattorin kuluneen käyttöajan näyttö. Ei voi nollata. |
| 2 | Virta Kytkin | Katkaisija, jonka avulla käynnistetään tai lopetetaan virran syöttö laitteeseen. Virransyöttö on päällä I-asennossa ja katkaistu O-asennossa. |
| 3 | Ulostuloaukko | Happi poistuu täältä. Potilasta varten aukkoon on liitetty joko yksiputkinen nenäkanyyli tai tavallinen happiputki. Konsentraattoriin liitetyn happiputken enimmäispituus on 15,2 m (50 jalkaa). |
| 4 | Virtaus Mittari | Käytetään annostellun hapen virtausnopeuden säätämiseen ja näyttämiseen. Virtausnopeutta voidaan säätää välillä 0,5-5 litraa minuutissa (LPM). Säätäminen tapahtuu säädintä kääntämällä. |
| 5 | Suodatinlokerot | Kädensijoissa olevat suodatinlokerot mahdollistavat valinnaisten suodattimien helpon irrottamisen ja puhdistamisen. |
| 6 | Ilmankostutin Pullo | Telineeseen kuuluu joustava kiinnityslenkki, jonka avulla ilmankostutinpullo pysyy paikallaan. Kysy omalta terveydenhuollon tarjoajaltasi, sopiiko kostutus sinulle. |
| 7 | Virtajohto | Johto kytketään pistorasiaan virran antamiseksi laiteelle. |

Äänimerkki: Äänimerkki hälyttää laitteen toimintatilasta, joko vaarailmoituksesta tai viasta, ja vahvistaa oikean näppäimen painalluksen.

3 Asetukset

Jos käytät kostutinpulloa, täytä pullo ensin tislattulla vedellä valmistajan määrittämään tasoon asti. Aseta pullo sille tarkoitetulle jalustalle ja kiinnitä joustavalla kiinnityslenkillä. Kiinnitä kostutinputken kierteinen pää pulloon ja toinen VisionAire 5 -laitteen ulostuloaukkoon. Kiinnitä happiputki ja/tai nenäkanyyli kostutinpullon ulostuloaukkoon.



Jos kostutinpulloa ei käytetä, kiinnitä happiputki ja/tai nenäkanyyli suoraan VisionAire 5 -laitteen ulostuloaukkoon.



4 Ilisäsuodattimien asentaminen yksikköön

Aseta valinnaiset ilmansuodattimet VisionAire 5:n kummankin puolen kahvoihin.



5 Käynnistäminen ja lämmitys

Kytke vaihtovirtajohto pistorasiaan.



Paina virtakytkin I-asentoon.



Kun VisionAire 5 -laitteeseen on kytketty virta oikein, tuntilaskuri pysyy päällä.

Huomautus: Kun laite on ensimmäisen kerran kytketty päälle, odota kymmenen (10) minuuttia, kunnes laite on saavuttanut toimintavaatimukset täyttävän tilan.

Kuvassa oleva virtajohto on vain havainnollistava; mukana toimitetut pistokkeet vastaavat maasi standardeja.

6 Säädä virtausasetus määräkseen mukaiselle tasolle

Valitse lääkärin määräämä virtaus kääntämällä virtausnopeuden säädintä.



VAROITUS: ON HYVIN TÄRKEÄÄ VALITA VAIN LÄÄKÄRIN SINULLE MÄÄRÄÄMÄ HAPPITASO. ÄLÄ MUUTA VIRTAAUSASETUSTA ILMAN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYSTÄ.

Hengitä normaalisti nenäkanyylin kautta.

Virtausnopeuden säätäminen: Käännä vastapäivään, jos haluat lisätä virtausta.

Käännä myötäpäivään, jos haluat vähentää virtausta.

Virtausnopeus katsotaan pallon puolivälin kohdalta. Ks. alla oleva kuva.