

INSTRUCCIONES PARA LA SALIDA DE AIRE
VISIONAIRE / VISIONAIRE V



Concentrador de oxígeno VisionAire y VisionAire V con opción de salida de aire

La siguiente información tiene como objetivo familiarizarle con el funcionamiento de la opción de Salida de aire para el VisionAire / VisionAire V. La Salida de aire permite al paciente utilizar un dispositivo nebulizador.

Asegúrese de leer y entender toda la información contenida en el manual del paciente en lo referente al uso del Concentrador de oxígeno VisionAire / VisionAire V antes de intentar utilizar la Salida de aire. En caso de duda, el proveedor del equipo le responderá con sumo agrado.

 ADVERTENCIA	<p>En caso de alarma o de cualquier señal de incomodidad, consulte inmediatamente al proveedor del equipo y/o a su médico.</p>
 ADVERTENCIA	<p>Esta unidad no es un dispositivo de reanimación cardiopulmonar. Los pacientes geriátricos, pediátricos y cualquier otro tipo de paciente incapaz de comunicar sus molestias mientras utiliza este concentrador de oxígeno, podrían necesitar un sistema de control adicional. Los pacientes con problemas de audición y/o visión podrían necesitar asistencia para controlar las alarmas. Consulte con su médico de inmediato si experimenta alguna molestia.</p>
 CUIDADO	<p>La concentración de oxígeno puede reducirse mientras la Salida de aire se encuentra en uso, o si no se utiliza un accesorio de nebulización.</p>
 CUIDADO	<p>El adaptador debe retirarse siempre de la Salida de aire cuando no se esté utilizando. No utilice la salida de aire sin acoplarle un nebulizador.</p>
 NOTA	<p>La Salida de aire del VisionAire / VisionAire V proporciona 6 litros por minuto (LPM) a 83 kPa (12 psig) cuando se utiliza el kit nebulizador R0132.</p>
 NOTA	<p>No se suministra oxígeno en la Salida de aire.</p>

INSTRUCCIONES DE USO

1. Localice la Salida de aire (**Figura 1**) en la parte superior de la unidad y localice el adaptador. Normalmente el adaptador se acopla al soporte de goma para evitar pérdidas (**Figura 1**).
2. Introduzca hasta donde le sea posible el extremo señalado del adaptador en el tubo del nebulizador (**Figura 2**).
3. Introduzca el adaptador en la Salida de aire hasta que se encaje con un chasquido, lo que lo fijará en posición (**Figura 3**).
4. La salida de aire ahora se encuentra abierta y el aire debería fluir a través del nebulizador, lo que permite el tratamiento.
5. Para apagar la Salida de aire, presione la pestaña metálica (**Figura 1**) para soltar el adaptador (**Figura 4**).

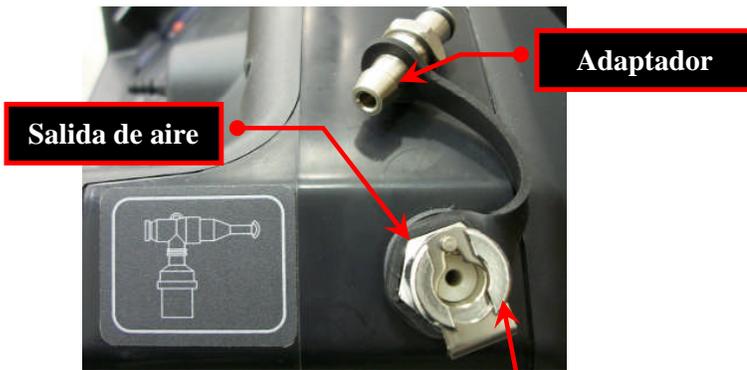


Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



MN177-1 Rev -